

## **Recomendaciones generales para la remisión de muestras para diagnóstico histopatológico**

- ✓ Redactar un informe del caso en el que se incluyan:
  - a. Datos del Veterinario actuante, del Propietario o del Establecimiento (teléfono y dirección de correo electrónico).
  - b. Datos del animal (especie, raza, sexo, edad y coloración del pelaje).
  - c. Breve reseña de la historia clínica del animal o de la presentación del caso colectivo. Incluir el tiempo de evolución.
  - d. Especificar la localización anatómica de donde fue extraída la muestra.
- ✓ Colocar las muestras en un frasco rotulado, preferentemente de plástico, con boca ancha y tapa hermética con un volumen de formol al 10% (9 parte de agua y 1 de formol) que sea no menor a 4 veces y hasta 10 veces mayor al volumen de la propia muestra a fijar.
- ✓ Tomar muestras representativas de la lesión de la cual se quiere el estudio, idealmente debería contener en la misma muestra la interfase entre los bordes de la lesión y el tejido sano.
- ✓ Para lograr una correcta fijación del formol, es conveniente tomar muestras de un ancho no mayor a 1 cm y que incluyan lo descrito en el punto anterior.
- ✓ Finalmente, el remitente recibirá electrónicamente (vía correo electrónico) un informe macroscópico de la muestra recibida, una descripción histológica y un diagnóstico histopatológico, con observaciones sobre el pronóstico y la evolución clínica del caso estudiado.